



AVVERTENZE E ISTRUZIONI D'USO DEL COLLAGENE AT[®] ESPANSO 6X6X60 A RAPIDO RIASSORBIMENTO

ISTRUZIONI D'USO E LINEE GUIDA PER LA EMOSTASI POSTESTRATTIVA CON COLLAGENE AT[®] ESPANSO


- 1) prelevare delicatamente con una pinzetta odontoiatrica dall'interno del flacone la striscia di Collagene AT[®] Espanso a rapido riassorbimento

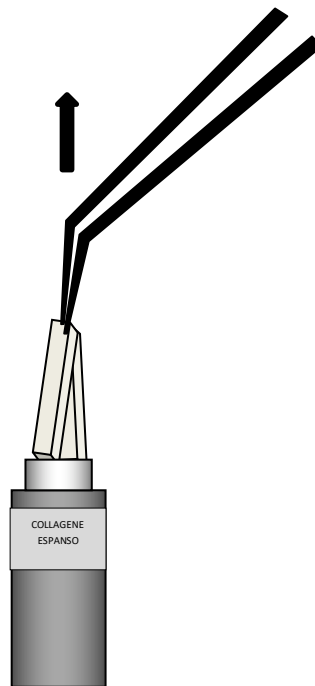


- 2) collocare delicatamente una o più strisce di Collagene AT[®] Espanso sopra l'alveolo postestrattivo

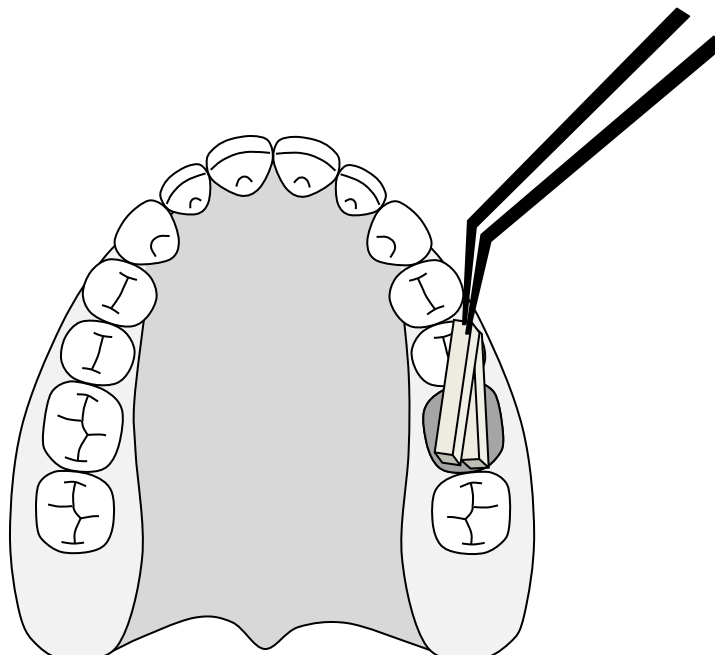


- 3) con un'altra pinzetta o con un otturatore tondo grande o piatto grande applicare la striscia all'interno del alveolo osseo postestrattivo

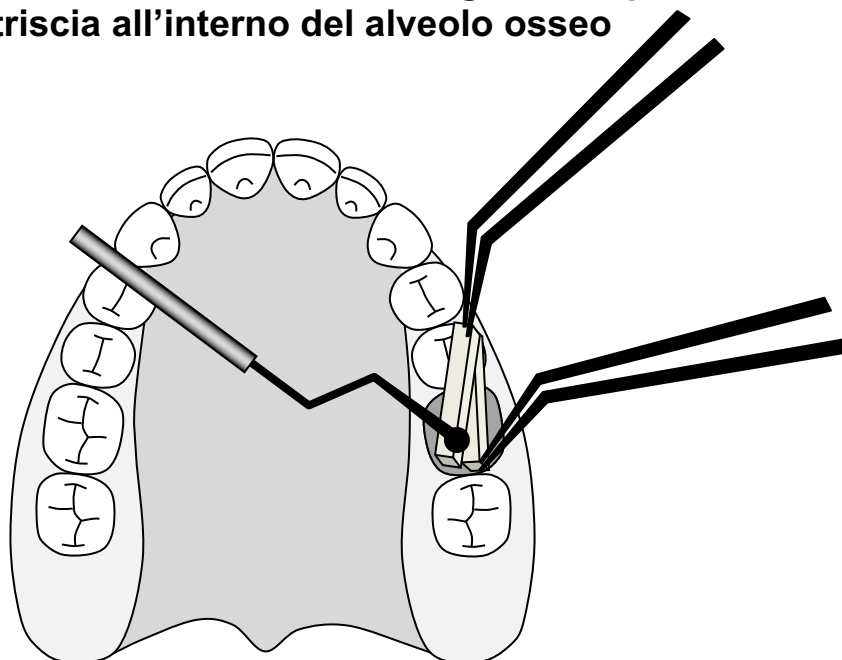


- 4) zeppare la striscia di Collagene AT® Espanso fino a riempire completamente l'alveolo postestrattivo ed applicare se necessario altre strisce fin a che non sia possibile una ulteriore compressione

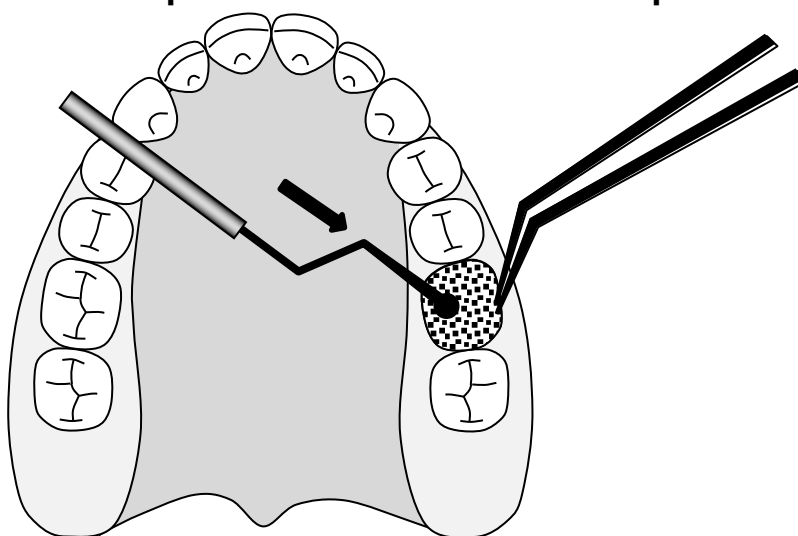


- 5) se vi è una eccedenza di Collagene AT® Espanso tagliarla con una forbice chirurgica e rimuoverla

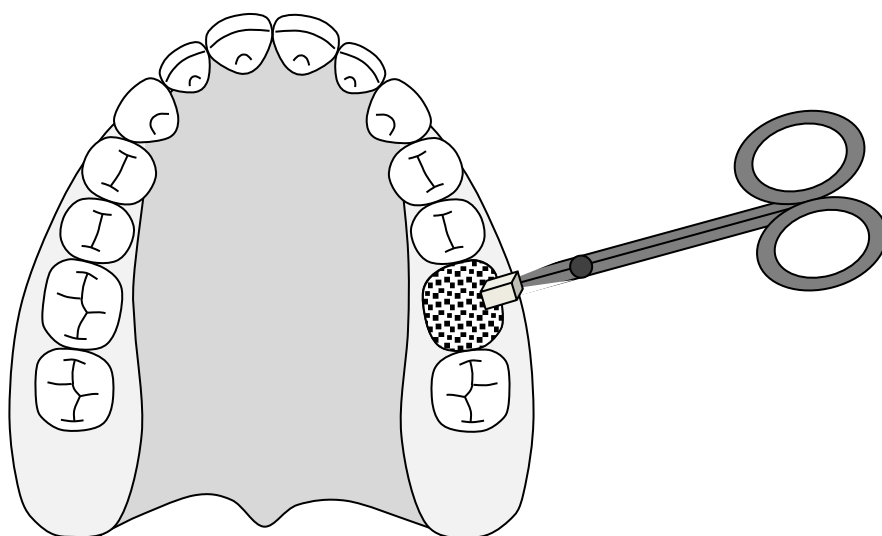


6) comprimere ulteriormente il Collagene AT® Espanso con rulli di cotone o garze

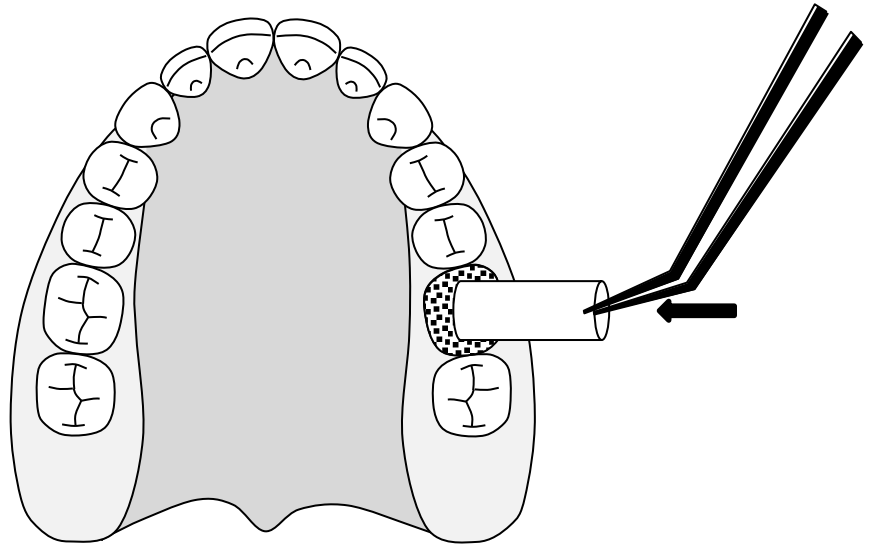

7) in alveoli molto grandi può essere opportuno applicare un punto incrociato sopra il Collagene AT® Espanso per stabilizzare il materiale

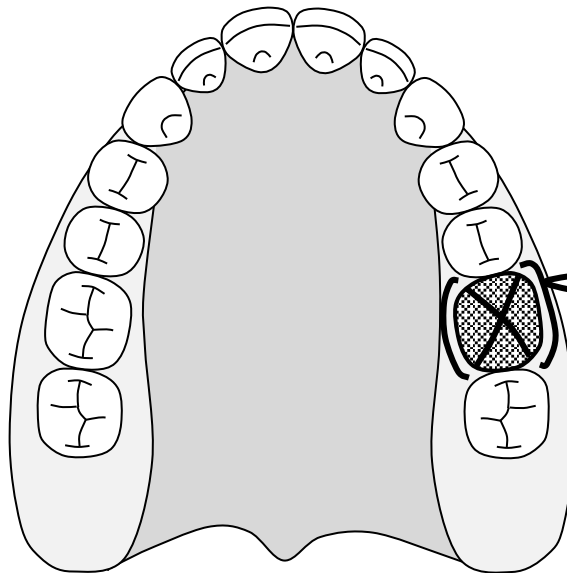


8) In questo caso può anche essere opportuno applicare un impacco chirurgico per proteggere l'alveolo; rimuovere il punto incrociato e l'impacco residuo dopo circa una settimana

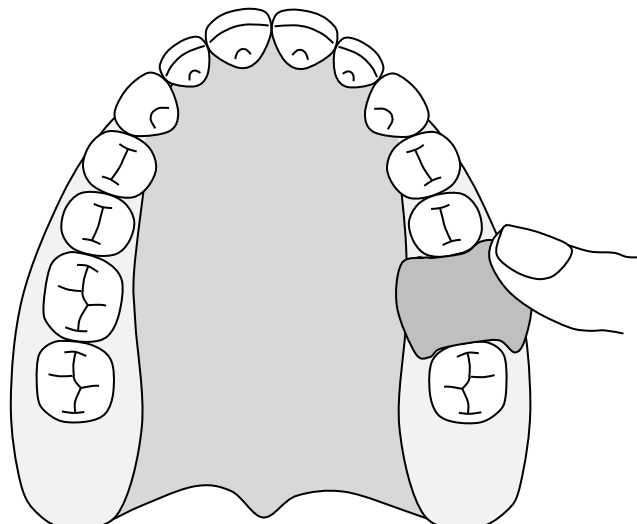


ISTRUZIONI D'USO E LINEE GUIDA PER LA RIGENERAZIONE GUIDATA DEL TESSUTO OSSEO NEGLI ALVEOLI POSTESTRATTIVI E NELLE CAVITA' OSSEE

- 1) prelevare delicatamente con una pinzetta odontoiatrica dall'interno del flacone la striscia di Collagene AT® Espanso a rapido riassorbimento

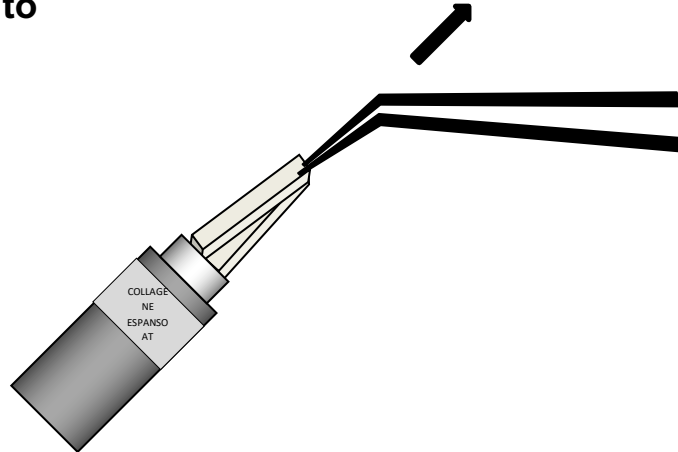


- 2) versare Idrossilapatite AT® granulare in un bicchierino

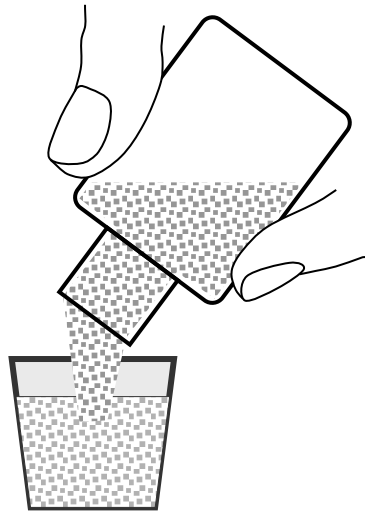


- 3) aprire il flacone di antibiotico liofilizzato e versarne qualche granulo nel bicchierino per mantenere asettica la Idrossilapatite AT® granulare
- 4) per aumentare la adesione di Idrossilapatite AT® granulare aggiungere Idrossilapatite Micrometrica AT® in una quantità corrispondente a circa il 20%

5) mescolare Idrossilapatite AT[®] ed antibiotico con la spatola per mescolazione

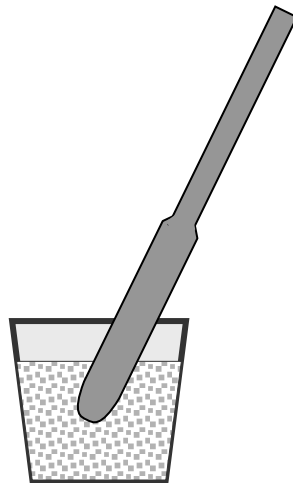


6) aprire una fiala di soluzione fisiologica


7) versarne il contenuto in eccesso nel bicchierino

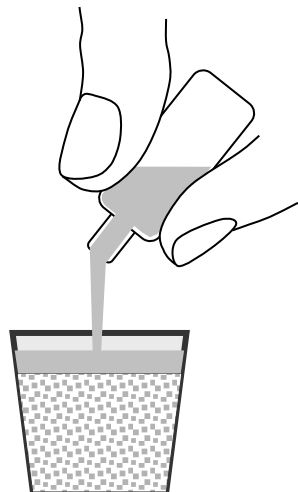


8) tamponare con garza la soluzione fisiologica in eccesso, in maniera di avere una adesività tra i granuli di Idrossilapatite AT[®]

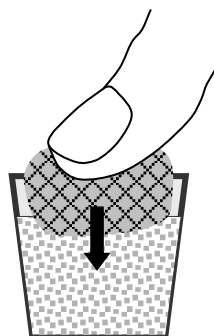


9) controllare che i granuli di idrossilapatite abbiano una adesività reciproca per capillarità grazie alla idratazione con fisiologica

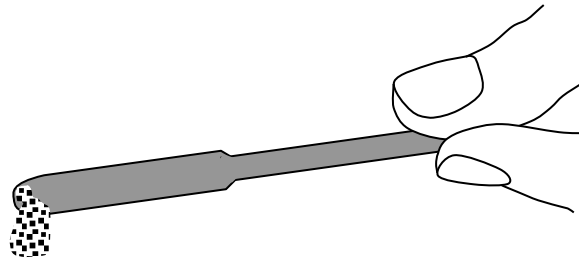


10) distendere con la spatola l'impasto di Idrossilapatite AT® su una piastra o su un blocco di mescolazione in uno strato sottile

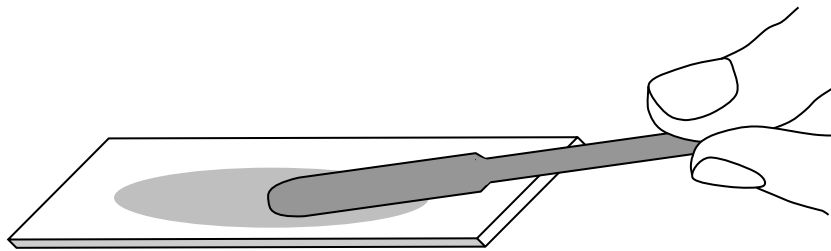


11) collocare la striscia di Collagene AT® Espanso a rapido riassorbimento sopra la Idrossilapatite AT®

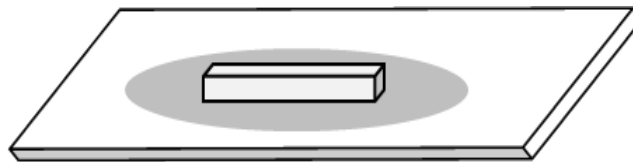


12) ruotare e premere delicatamente con due o tre dita la striscia di Collagene AT® Espanso verso la Idrossilapatite AT® sulla piastra o sul blocco di mescolazione

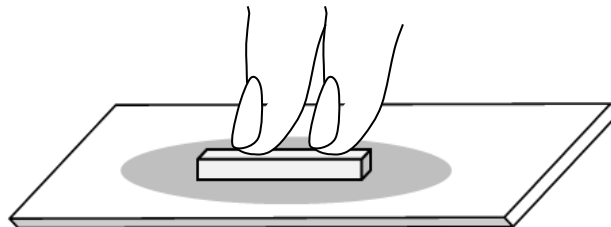


13) ruotare la striscia fino a che sulla sua superficie laterale aderisce uno strato di Idrossilapatite AT® e la striscia comincia ad assumere una forma cilindrica

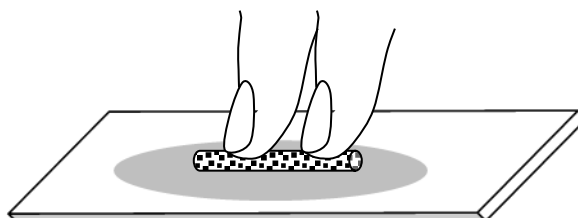


- 14) rimuovere con frese diamantate tonde ad alta o bassa velocità o con un escavatore tagliente il tessuto infiammatorio eventualmente presente all'interno del tessuto osseo dell'alveolo postestrattivo o della cavità ossea**

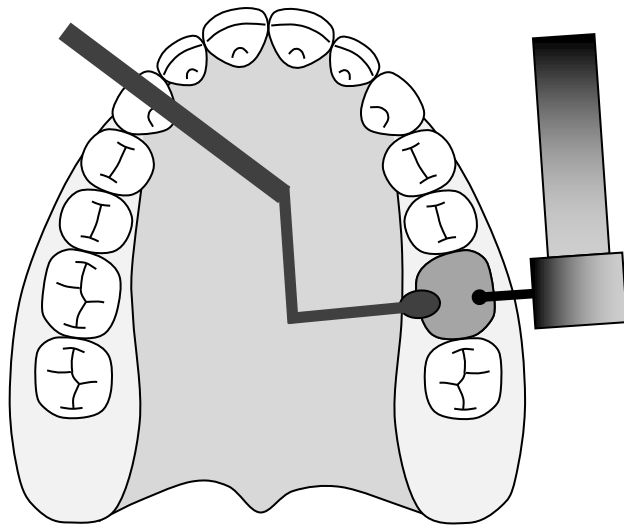


- 15) passare attraverso i tessuti molli il filo di sutura per eseguire un punto incrociato senza annodarlo**

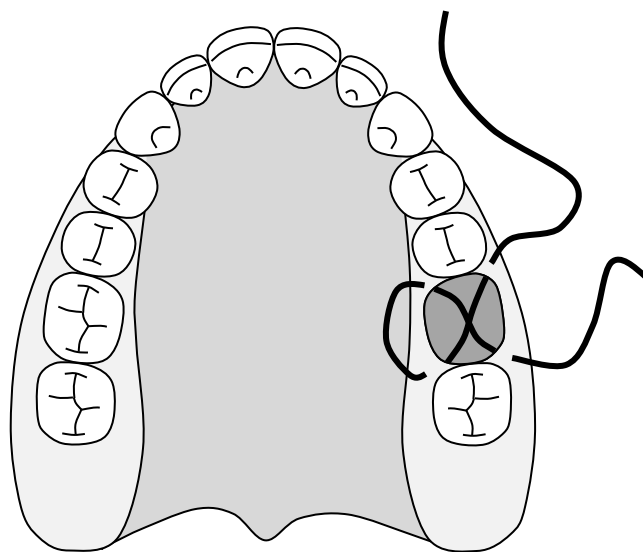


- 16) dislocare lateralmente i fili intermedi in modo che non ostacolino l'inserimento dei materiali**

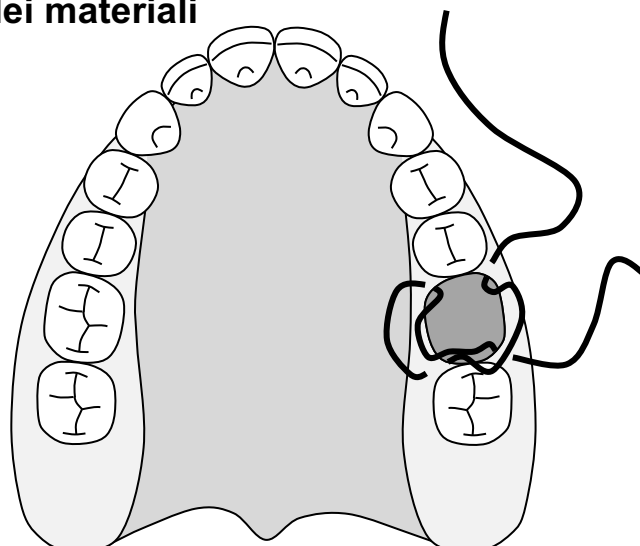


- 17) prelevare una o più strisce di Collagene AT® Espanso con Idrossilapatite AT® con una o due pinzette odontoiatrica e collocarla delicatamente sul alveolo postestrattivo o sulla cavità ossea

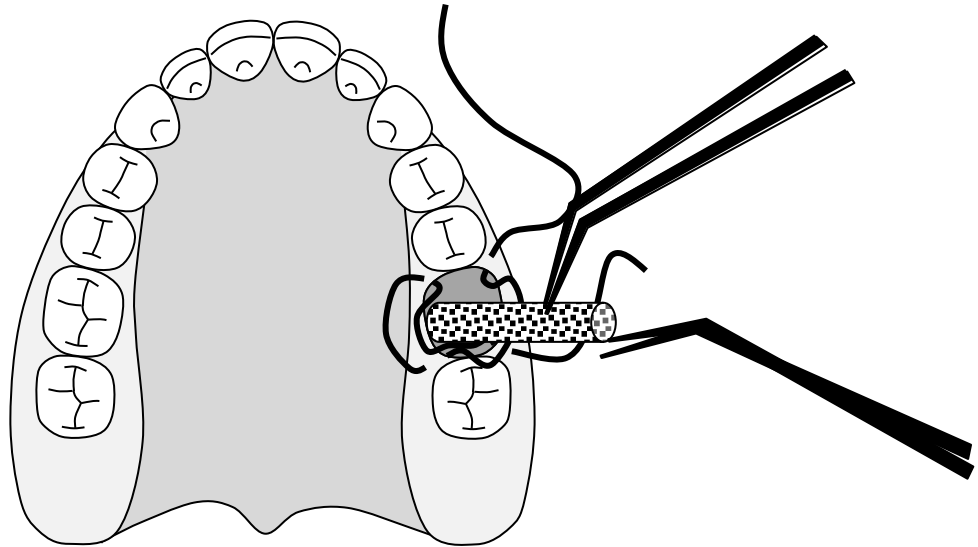

- 18) con un otturatore tondo o piatto grande o con le pinzette comprimere la striscia all'interno del alveolo osseo postestrattivo o della cavità ossea

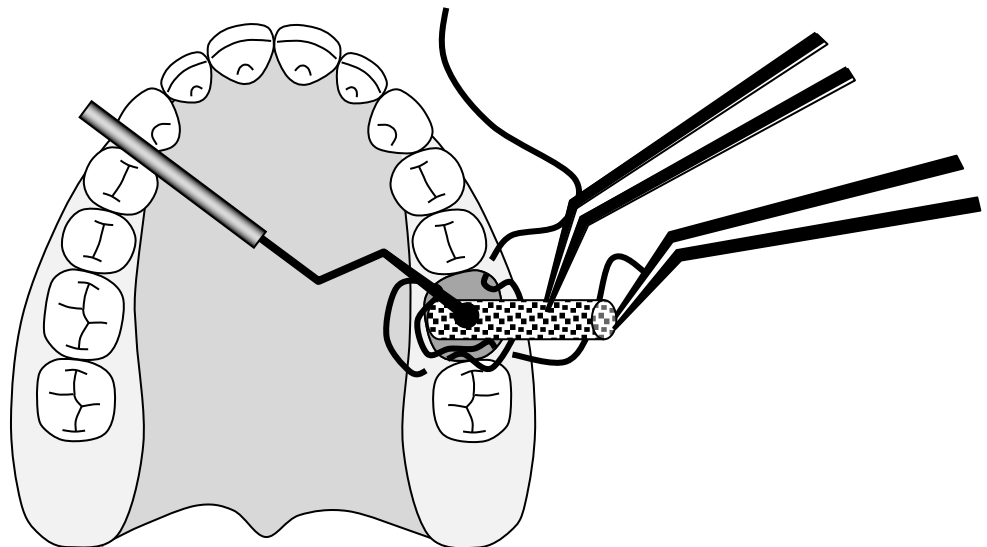


- 19) con un otturatore grande tondo o piatto o con le pinzette odontoiatriche zeppare la striscia di Collagene AT® Espanso con Idrossilapatite AT® fino a riempire completamente l'alveolo postestrattivo e fino a che non sia possibile una ulteriore compressione

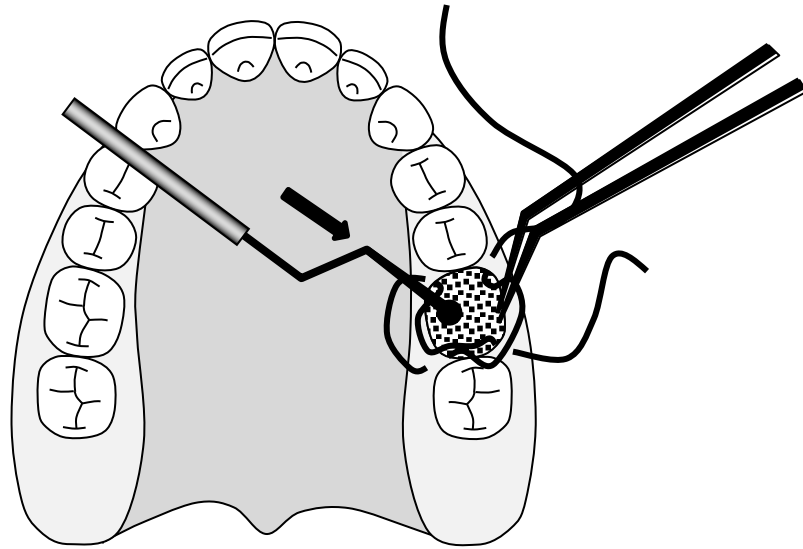


20) è importante per permettere la rigenerazione ossea che la compressione sia particolarmente forte, in modo che non vi sia più la possibilità di aggiungere altro materiale: eventualmente aggiungere ulteriori strisce con Idrossilapatite AT®

21) con rulli di cotone o garze comprimere ulteriormente il Collagene AT® Espanso con Idrossilapatite AT®

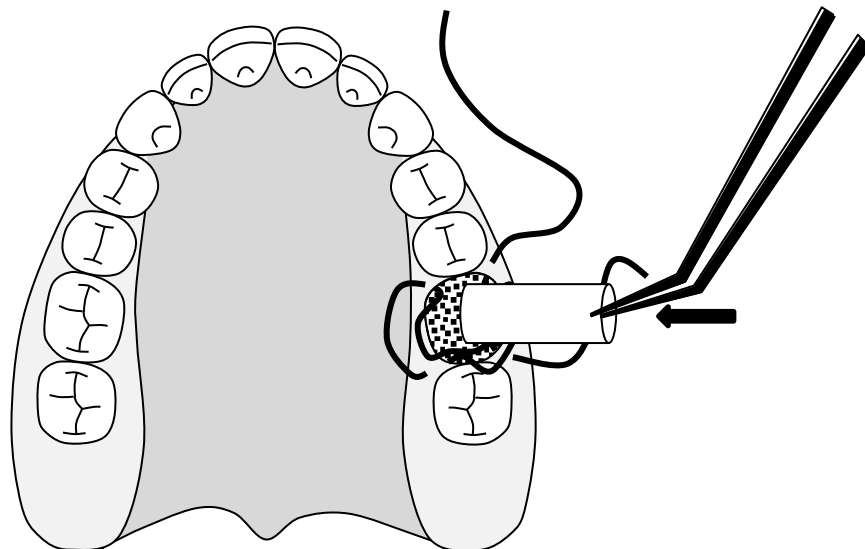

22) applicare sopra il Collagene AT® Espanso una membrana di Collagene AT® delle dimensioni dell' alveolo o della cavità ossea e annodare il filo del punto incrociato per stabilizzare i materiali

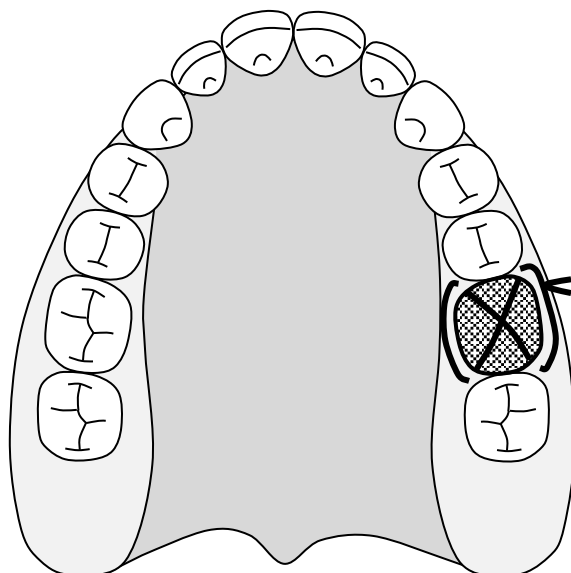

23) applicare preferibilmente un impacco chirurgico per proteggere ulteriormente l'alveolo; rimuovere i punti e l'eventuale impacco residuo dopo circa una settimana

